

Полезные советы по чистке и дезинфекции оправ и солнцезащитных очков Silhouette

Как обеспечить безопасную чистку очков в
связи с распространением вируса COVID-19:

Рекомендации по Чистке и Дезинфекции

Совет 1: Обязательное мытье рук

Правильное мытье рук может предотвратить заражение вирусом и избежать загрязнения поверхностей вирусами. Поэтому вы должны всегда мыть руки не менее 20 секунд, прежде чем снимать и надевать очки

Совет 2: Проводите чистку очков несколько раз в день

Вирусы могут долго оставаться на поверхности. Поэтому мойте очки несколько раз в день чистой водой с мылом или средством для мытья посуды *

Совет 3: Ультразвуковая чистка

Еще одним возможным вариантом является чистка очков в ультразвуковом аппарате (без спиртовых добавок)

* В настоящее время рекомендуется гигиена рук для защиты от коронавирусной инфекции, регулярное мытье рук с мылом в течение не менее 20 секунд упоминается в качестве профилактической меры

Рекомендации по Чистке и Дезинфекции

Примечание: дезинфицирующие средства на спиртовой основе

Обычные дезинфицирующие средства (антибактериальные, уничтожающие бактерии и вирусы) содержат спирт в разбавленной концентрации. Для оправ Silhouette эти дезинфицирующие средства не оказывают отрицательного воздействия и не наносят ущерба. Важно, что дезинфицирующие средства на спиртовой основе могут повредить корректирующие линзы и поликарбонатные солнцезащитные линзы. Поэтому опрыскивание и чистка очков Silhouette такими дезинфицирующими средствами не рекомендуется. Однако можно протирать очки и линзы спиртовыми дезинфицирующими средствами в течение короткого времени (не более 30 секунд).

Рекомендации по Чистке и Дезинфекции

Примечание: этанол / этиловый спирт и изопропанол

Используются оптиками в качестве обычного чистящего средства.

Внимание: использование для чистки поликарбонатных линз должно быть ограничено из-за возможного повреждения поликарбоната.

Поверхности корректирующих линз, солнцезащитных линз и оправ Silhouette можно протирать только в течении короткого времени (не более 30 секунд).